

しきゅうけいかんかくちょうき

子宮頸管拡張器

Uterine Cervical Dilators

子宮頸管から内子宮口を順に拡張させていく器械。

通称名：拡張ブジー、ブージー

にちぼがたしきゅうけいかんかくちょうき

日母型子宮頸管拡張器

ヘガール型

J.A.M.W Type Uterine Cervical Dilators



吾妻ヘガールに準じ日本母性保護医協会で規格された拡張器。

製品コード	識別番号	規格	組合せ
18288	CM-5080	ヘガール型 (短)	No. 1～No.20 27本組
18289			No. 1～No.15 22本組
18290			No.16～No.20 5本組

黄銅製Crメッキ

■日母型子宮頸管拡張器規格(短)

ヘガール型寸法							
番号	元の太さ (mm)	先の太さ (mm)	重さ (g)	番号	元の太さ (mm)	先の太さ (mm)	重さ (g)
1	4.0	2.7	28	10	8.8	7.2	79
2	4.5	3.0	32	10.5	9.1	7.5	82
3	5.0	3.5	37	11	9.4	7.8	85
4	5.5	4.0	45	11.5	9.7	8.1	88
5	6.0	4.5	48	12	10.0	8.4	91
5.5	6.25	4.75	51	13	10.5	8.8	94
6	6.5	5.0	55	14	11.0	9.3	97
6.5	6.75	5.25	58	15	12.0	10.0	100
7	7.0	5.5	61	16	13.0	10.5	103
7.5	7.3	5.7	64	17	14.0	11.0	107
8	7.6	6.0	67	18	15.0	12.0	111
8.5	7.9	6.3	70	19	16.0	13.0	115
9	8.2	6.6	73	20	17.0	14.0	120
9.5	8.5	6.9	76				

本品は吾妻ヘガール(短)に準じ、直径形状の規格統一を行い、
1 / 2 号を7本加えて拡張度合をゆるやかにし、頸管破裂などの損傷を
防止する目的で制定された規格品です。


- 先端部には錘を入れ、指定の重さに合わせる。
- 先端から7cm のところに画線を付ける。(裏側にも)
- 一般公差 $\pm 2\%$ 。(ただし全長および柄の付近は $\pm 5\%$)
- 「日母型」の文字を握り部の両面に刻印する。

あずましきゅうけいかんかくちょうき

吾妻子宮頸管拡張器

ヘガール型

Azuma Uterine Cervical Dilators

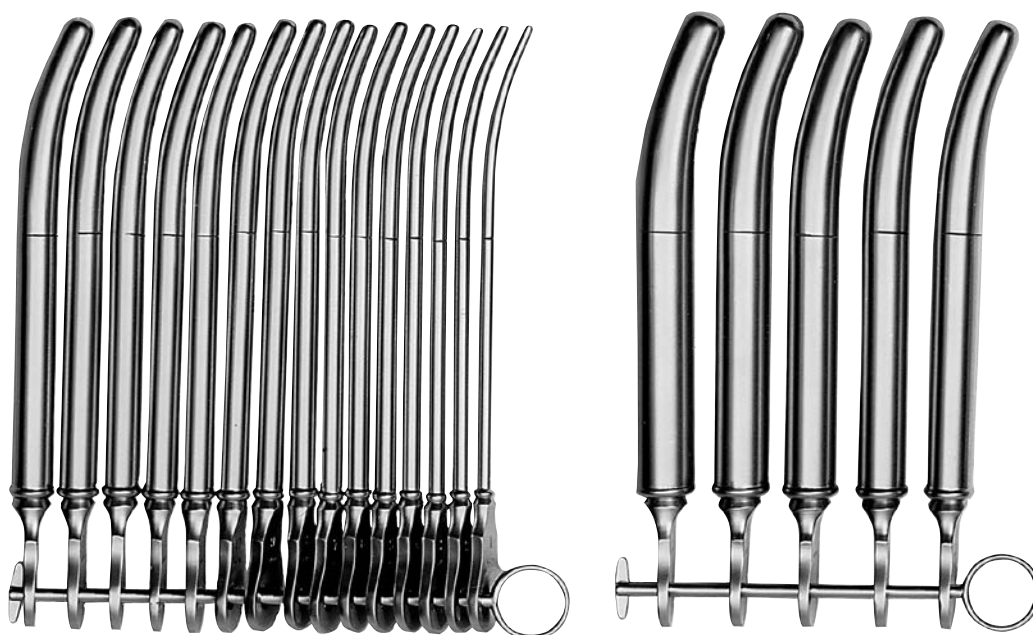

CM-5077/CM-5078

ヘガール氏拡張器をモデルとし改良され、昭和26年に日本工業規格で太さ・寸法を規格化された拡張器。

製品コード	識別番号	規 格	組 合 せ
18280	CM-5077	錘 無	No. 1～No.15 15本組
18281			No.16～No.20 5本組
18282			No.21～No.25 5本組
18283			No.26～No.30 5本組
18284	CM-5078	錘 入	No. 1～No.15 15本組
18285			No.16～No.20 5本組
18286			No.21～No.25 5本組

黄銅製Crメッキ

●先端から7cmのところに画線が付けてあります。

製品コード	品名	届出番号	販売名	製造販売元
-------	----	------	-----	-------

子宮頸管拡張器

18289	日母型子宮頸管拡張器 ヘガール型(短)/No.1~No.15/22本組	11B1X00002Z52003	日母型子宮頸管拡張器	アトムメディカル株式会社
18288	日母型子宮頸管拡張器 ヘガール型(短)/No.1~No.20/27本組	11B1X00002Z52003	日母型子宮頸管拡張器	アトムメディカル株式会社
18290	日母型子宮頸管拡張器 ヘガール型(短)/No.16~No.20/5本組	11B1X00002Z52003	日母型子宮頸管拡張器	アトムメディカル株式会社
18284	吾妻子宮頸管拡張器(ヘガール型)錘入/No.1~No.15/15本組	11B1X00002Z52001	吾妻子宮頸管拡張器	アトムメディカル株式会社
18285	吾妻子宮頸管拡張器(ヘガール型)錘入/No.16~No.20/5本組	11B1X00002Z52001	吾妻子宮頸管拡張器	アトムメディカル株式会社
18286	吾妻子宮頸管拡張器(ヘガール型)錘入/No.21~No.25/5本組	11B1X00002Z52001	吾妻子宮頸管拡張器	アトムメディカル株式会社
18280	吾妻子宮頸管拡張器(ヘガール型)錘無/No.1~No.15/15本組	11B1X00002Z52001	吾妻子宮頸管拡張器	アトムメディカル株式会社
18281	吾妻子宮頸管拡張器(ヘガール型)錘無/No.16~No.20/5本組	11B1X00002Z52001	吾妻子宮頸管拡張器	アトムメディカル株式会社
18282	吾妻子宮頸管拡張器(ヘガール型)錘無/No.21~No.25/5本組	11B1X00002Z52001	吾妻子宮頸管拡張器	アトムメディカル株式会社
18283	吾妻子宮頸管拡張器(ヘガール型)錘無/No.26~No.30/5本組	11B1X00002Z52001	吾妻子宮頸管拡張器	アトムメディカル株式会社

有窓鈍匙 / 鋭匙・流産鉗子

18445	日母型有窓鈍匙 先幅 4.5mm	11B1X00002Y37006	日母型有窓鈍匙	アトムメディカル株式会社
18446	日母型有窓鈍匙 先幅 6mm	11B1X00002Y37006	日母型有窓鈍匙	アトムメディカル株式会社
18409	日母型有窓鈍匙 先幅 9mm	11B1X00002Y37006	日母型有窓鈍匙	アトムメディカル株式会社
18412	日母型有窓鈍匙 先幅 12mm	11B1X00002Y37006	日母型有窓鈍匙	アトムメディカル株式会社
18415	日母型有窓鈍匙 先幅 15mm	11B1X00002Y37006	日母型有窓鈍匙	アトムメディカル株式会社
18301	ブンム早産用有窓鈍匙 No.1	11B1X00002Y37008	ブンム早産用有窓鈍匙	アトムメディカル株式会社
18302	ブンム早産用有窓鈍匙 No.2	11B1X00002Y37008	ブンム早産用有窓鈍匙	アトムメディカル株式会社
18303	ブンム早産用有窓鈍匙 No.3	11B1X00002Y37008	ブンム早産用有窓鈍匙	アトムメディカル株式会社
18304	ブンム早産用有窓鈍匙 No.4	11B1X00002Y37008	ブンム早産用有窓鈍匙	アトムメディカル株式会社
18305	ブンム早産用有窓鈍匙 No.5	11B1X00002Y37008	ブンム早産用有窓鈍匙	アトムメディカル株式会社
18201	オルスハウゼン子宮有窓鋭匙 No.1	11B1X00002Y37003	オルスハウゼン子宮有窓鋭匙	アトムメディカル株式会社
18202	オルスハウゼン子宮有窓鋭匙 No.2	11B1X00002Y37003	オルスハウゼン子宮有窓鋭匙	アトムメディカル株式会社
18203	オルスハウゼン子宮有窓鋭匙 No.3	11B1X00002Y37003	オルスハウゼン子宮有窓鋭匙	アトムメディカル株式会社
18204	オルスハウゼン子宮有窓鋭匙 No.4	11B1X00002Y37003	オルスハウゼン子宮有窓鋭匙	アトムメディカル株式会社
18205	オルスハウゼン子宮有窓鋭匙 No.5	11B1X00002Y37003	オルスハウゼン子宮有窓鋭匙	アトムメディカル株式会社
18806	ヒルスト流産鉗子 先幅 6mm	11B1X00002Y39066	ヒルスト流産鉗子	アトムメディカル株式会社
18807	ヒルスト流産鉗子 先幅 7mm	11B1X00002Y39066	ヒルスト流産鉗子	アトムメディカル株式会社
18808	ヒルスト流産鉗子 先幅 8mm	11B1X00002Y39066	ヒルスト流産鉗子	アトムメディカル株式会社